

NKL®

## Aplicador Auricular VNS Instruções de Uso

O aplicador auricular VNS (*Vagus Nerve Stimulation*) da NKL propicia a aplicação do estímulo elétrico na parte interna da orelha atingindo assim boa parte de suas terminações nervosas, incluindo o nervo vagal.

A aplicação do estímulo elétrico é feito através do uso de ponteiros de bastonetes de algodão (hastes flexíveis) umedecida em soro fisiológico.


O algodão, por possuir alta capacidade de retenção de soro, se mantém úmido durante toda a sessão de estímulo, garantindo assim conforto ao paciente.



**Para utilizar o aplicador VNS siga as seguintes instruções:**

**1** - Com o auxílio de uma tesoura, corte duas pontas de bastonetes à até 3 mm após o término do algodão;


**2** - Insira as pontas cortadas dentro dos recipientes do aplicador, observe o contato do algodão com as molas de inox. O algodão ficará sobressalente cerca de 6 mm para fora dependendo da marca/modelo do bastonete utilizado;

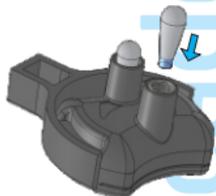

**3** - Umedeça as pontas de algodão com soro fisiológico sem encharcá-las;

[continua...](#)

**Cabo safety plug  
para botão de pressão**

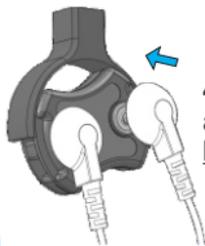

**4 - Realize a conexão elétrica do aplicador  
ao seu eletro estimulador NKL através dos  
botões de pressão modelo 3,4mm;**

**5 - Posicione os aplicadores na parte interna da orelha  
vestindo o arco sobre a cabeça, certifique-se que ambos  
os contatos estão exercendo leve pressão sobre os  
pontos da orelha.**

> É possível ajustar os contatos em duas posições  
distintas de giro, para isso abra ligeiramente o engate  
para liberar e prender a peça principal na posição  
desejada.



> Se necessário, ajuste a abertura do arco de  
forma a não aplicar demasiada pressão sobre a  
cabeça do paciente entretanto com força  
suficiente para garantir o contato elétrico dos  
aplicadores.




**6 - Proceda com a aplicação da sessão de estimulação. Ao  
término remova o aplicador e descarte as ponteiros de  
algodão das hastes flexíveis.**

**7 - Utilizando outro bastonete, realize a limpeza e seque o  
contato das molas antes de guardar o seu aplicador  
auricular VNS.**



**12mm  
ENTRE CENTROS**

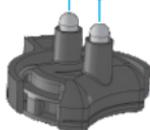

A distância entre as ponteiros de  
algodão do aplicador é fixa.

Diferentes posicionamentos podem  
ser feitos na orelha conforme técnica  
utilizada.



*Substitua as pontas dos bastonetes de algodão a cada uso.  
Nunca aplique estímulo elétrico com as pontas de algodão secas.  
Verifique regularmente o estado das molas de contato.*